

## Nase-Mund-Bedeckung

### Artikelbeschreibung:

- Oberstoff Baumwolle uni oder mit Muster
- Futterstoff Baumwollpopeline weiß
- Futtertasche dünner Baumwollstoff
- 2 Gummibänder
- gute Passform durch Schnitt und verschiedene Größen: S -XL
- aufgestickte Größe gegen Verwechslungen



Diese Gesichtsmasken decken das Gesicht (Nase-Mund) von oberhalb der Nase bis unter das Kinn ab - oben und unten formt jeweils ein flacher Abnäher die Gesichtsförm. Sie bestehen aus drei Lagen Baumwolle und zwei Gummibändern, sind sorgfältig handgefertigt, ringsum abgesteppt und haben die Größe aufgestickt. Der Stoff wurde gewaschen und heiß gebügelt.

### Pflegehinweis:

- Die Gesichtsmasken sollen nach Benutzung täglich bei 60°C gewaschen werden - bitte unbedingt eventuelle Filter vorher entfernen!
- Filter unbedingt mehrmals täglich wechseln! Nicht nass oder durchfeuchtet verwenden!
- Nass in Form ziehen, mit Restfeuchte heiß bügeln.
- Für zwischendurch: mal in die Sonne legen - auch UV-Strahlung kann Viren und Bakterien abtöten.

### Filter zuschneiden (nicht im Lieferumfang enthalten!):



## Leichtes Bügeln:

- Maske von links = innen bügeln
- Bügeleisen auf 3 Punkte stellen (Baumwolle)
- möglichst nicht auf dem Gummi bügeln (einfach über den Rand des Bügelbrettes hängen lassen)
- Mit der Bügeleisenspitze innen an den Abnehmern oben und unten entlang fahren
- Zum Schluss über die Abnehmer oben und unten bügeln



## Rücknahme und Umtausch:

Da es sich hier um Hygieneartikel handelt sind Umtausch und Rücknahme leider ausgeschlossen.

## meine Vorbereitung:

- alle Stoffe habe ich bei 60°C mit Frosch Waschmittel (BIO) in der Waschmaschine gewaschen
- alle Stoffe habe ich mit höchster Hitzestufe und mit Dampf gebügelt, vor und während der Bearbeitung

## Hinweis:

Kein medizinisches Produkt! Diese Nase-Mund-Bedeckung / Gesichtsmaske kann eine medizinische Atemmaske nicht ersetzen und hat keine FFP1, FFP2, FFP3 Zulassung. Sie ist deshalb nur für den privaten Gebrauch!

## Etikettierung/Kennzeichnungspflicht:

Aufgrund der Anlage V Nr. 38 der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für den EWR entfällt die Textilkennzeichnungspflicht.

**BITTE BLEIB GESUND!**

Annett 😊

## Der Schnitt

Kostenlose Schnitte gibt es ja eigentlich viele, doch wenn schon, dann sollte er einige - für mich - wichtige Kriterien erfüllen. Deshalb habe ich meinen eigenen Schnitt entwickelt:

### Kriterien:

#### 1. wegen der Hygiene - keine Falten

(alle kommerziellen OP-Masken, die wir kennen sind Einmal-Masken. Sie werden nach Gebrauch entsorgt. Unsere soll aber möglichst oft waschbar sein, und gerade in Falten bleibt der Schmutz wunderbar hängen.)

#### 2. keine Naht über dem Mund

alle mir bisher bekannten Modelle dieser Form haben über dem Mund eine Naht. Auch das wollte ich vermeiden.

1. lässt sich eine runde Naht schlecht bügeln,
2. könnten auch hier wieder unnötig Schmutzpartikel hängen bleiben, was es meiner Meinung nach zu vermeiden gilt.

#### 3. leichtes Bügeln

dieser Nase-Mund-Schutz ist aus Baumwolle und muss regelmäßig heiß (60°C) gewaschen werden. Qualitativ hochwertige Baumwolle hält Temperaturen bis 95°C aus, allerdings knittert das Material furchtbar. Auch wenn man es nass gut in Form ziehen kann, hin und wieder muss mal gebügelt werden, dann sollte die Form das gut möglich machen. Zusätzlich habe ich die Außenkante ringsum schmal abgesteppt, damit bleibt die Form gut erhalten.

#### 4. Futtertasche für leicht wechselbare knitterfreie Filter

Ob diese Nase-Mund-Stoffmasken tatsächlich schützen ist mehr als umstritten. Es gibt jedoch Empfehlungen verschiedener Institute, dass ein wechselbarer Filter - z.B. Küchenpapier - zusätzlich etwas mehr Schutz bietet. Außerdem, wer seinen Nase-Mund-Schutz schon mal etwas länger getragen hat merkt schnell, dass er durch unsere feuchte Atemluft unangenehm nass wird. Der zusätzliche Filter kann zwischendurch sehr schnell gewechselt werden, bevor der Stoff durchnässt ist. Damit der Filter faltenfrei und leicht einzusetzen ist, ist mein Schnitt vorne flach.

#### 5. unterschiedliche Größen für bessere Passform

Wenn der Nase-Mund-Schutz nicht ringsum anliegt verliert er stark an Nutzen. Kinder haben einfach einen kleineren Kopf! Auch wenn unser Kopf im Verhältnis zum Rest unseres Körpers im Kindesalter nicht so sehr viel wächst, ein erwachsener Mann hat einfach einen größeren Kopf als ein Kind. Deshalb habe ich verschiedene Größen: S, M, L, XL. Damit es keine Verwechslungen gibt habe ich die Größe an der Seite des Mundschutzes aufgestickt.